

## I 8 Instrukce pro transport vzorků

### **Pokyny pro pracovníky převážející primární vzorky, laboratorní zprávy či jinou zdravotnickou dokumentaci s citlivými osobními údaji:**

1. Transport vzorků je prováděn svozovými pracovníky firmy
2. Při transportu musí být dbáno na šetrnost, rychlost a adekvátní teplotu.
3. Vzorky musí být dopravovány ve vhodné, uzamykatelné nádobě, aby se zabránilo zmrznutí nebo přehřátí vzorků.
4. Povolená teplota se pohybuje v rozmezí 5 °C až 24 °C.
5. Transport do laboratoře je nutné zajistit v co nejkratší době.
  - a. AMC, CVS, abort - do 24 hodin po odběru
  - b. Periferní krev v heparinu - do 48 hodin po odběru
  - c. Periferní krev v EDTA - do 72 hodin po odběru
  - d. Bukální stěr - do 72 hodin po odběru
6. Primární vzorek je doprovázen řádně vyplněnou průvodkou pro dané vyšetření. Průvodky pro jednotlivá vyšetření musí být umístěny v samostatném obalu, aby nemohlo dojít k jejich znehodnocení.
7. Během přepravy je nutné zabránit jakékoliv manipulaci, která by mohla být příčinou mechanického poškození či ztráty vzorku.
8. Při transportu nesmí dojít k vyzrazení osobních dat klientů nepovolaným osobám. (Převoz v uzamykatelném kufríku.)

Vypracovala: Mgr. Iveta Světlíková

Schválil: RNDr. Miroslav Fišer

Datum: 5. 3. 2024